



# INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

## Pinça Bipolar de Uso Único

**Nome Técnico:** Pinça Bipolar

**Nome Comercial:** Pinça Bipolar de Uso Único

**Fabricante Real:**  
**Faulhaber Pinzetten OHG**  
Daimlerstr. 1  
Frittlingen, 78665  
Alemanha

**Fabricante Legal:**  
**adeor medical AG**  
Martinshof 5  
83626 Valley  
Alemanha

**Importado e Distribuído por:**  
**Canada Central de Negócios do Brasil Ltda.**  
Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1369, pavilhão 27, sala 01  
- 2º andar - Sarandi - Porto Alegre/RS, Brasil  
CEP 91.150-010  
CNPJ: 01.911.022/0001-76  
Autorização de Funcionamento nº: 8.00.038-9

**Resp. Técnico:** Carla Sturm Trindade  
CRF/RS 4709



Atenção



Não reutilizar



Siga as Instruções de  
operação



Número de catálogo



Esterilizado por radiação



Código do lote



Proteja o produto contra  
umidade  
e condensação



Data de validade



Proteja o produto contra  
a luz solar direta



Fabricante / Data de  
fabricação



CE, incluindo o código  
do organismo notificado

**PRODUTO DE USO ÚNICO**  
**PROIBIDO REPROCESSAR**

**ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO**  
**PRODUTO DE USO MÉDICO**

**Registro ANVISA nº: 80003890141**



# INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

## Pinça Bipolar de Uso Único

### ATENÇÃO:

Os instrumentos de uso único são fornecidos estéreis.

Por favor, leia as informações neste folheto cuidadosamente. Uso e cuidados inadequados ou uso para fins não intencionais podem levar a prematuro desgaste ou riscos para pacientes e usuários.

### USO PRETENDIDO:

Pinça bipolar de uso único feita por adeor A medical AG destina-se ao uso em todas as áreas de cirurgia aberta. Elas são projetadas para segurar, manipular e coagular tecido. Elas estão conectadas através de um cabo bipolar adequado, com a saída bipolar de um gerador HF e podem ser utilizadas apenas com corrente bipolar de coagulação. Pinça bipolar adeor deve ser operada com os seguintes parâmetros: Faixa de frequência entre 300 kHz e 1.000 kHz; funcionamento máximo do gerador tensão 600 Vp.

O tipo de tratamento deve ser determinado individualmente em cada caso pelo cirurgião em cooperação com o especialista de medicina interna e o anestesiologista. Os procedimentos típicos com cirurgia de HF são:

- Dermatologia: epilação, remoção de verrugas
- ORL: remoção, hemostasia bipolar
- Ginecologia: conização elétrica do cérvix, esterilização através de coagulação bipolar da trompa de Falópio
- Urologia: ressecção transuretral da próstata, de carcinomas da bexiga e papilomas da parede da bexiga, corte e coagulação em procedimentos transabdominais
- Laparoscopia e cistoscopia: extirpação de pólipos
- Cirurgia geral: corte primário, separação de tecidos, cirurgia plástica, hemostasia, coagulações
- Neurocirurgia: coagulações bipolares



# INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

## Pinça Bipolar de Uso Único

### CONTRAINDICAÇÕES:

A pinça bipolar de uso único não deve ser usada se o médico determinar que o risco para o paciente supera os benefícios. Pinça bipolar descartável feita por adeor medical AG não deve ser usado para esterilização tubária ou coagulação do tubo para esterilização.

Não use em pacientes com insuficiência cardíaca, com marca-passos ou outros implantes ativos.

### ATENÇÃO:

Instrumentos descartáveis para eletrocirurgia só podem ser usados por pessoas que são especialmente treinadas ou instruídas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- A verificação, uso e manuseio dos instrumentos eletrocirúrgicos é responsabilidade do usuário.
- Antes de cada uso, o instrumento de uso único deve ser inspecionado quanto a desgaste e danos visíveis, como rachaduras, fraturas ou falhas no isolamento, em áreas específicas, como a lâmina, ponta, ranhura, conector, bloqueio e movimento das partes. Verificar o isolamento completamente.
- Não use o instrumento de uso único se danificado.
- Não use o instrumento de uso único na presença de substâncias inflamáveis ou substâncias explosivas.
- Não coloque o instrumento de uso único em cima do paciente.
- Realize a coagulação somente se as superfícies de contato estiverem na área visível. Não toque em qualquer outro instrumento de metal durante o procedimento.

### ATENÇÃO:

As partes mencionadas nesta instrução de uso são apenas de uso único. Elas não podem ser reesterilizadas. A reesterilização causa mau funcionamento das partes do produto que pode afetar a sua função.

Se a pinça descartável estiver danificada, especialmente no isolamento ou no conector, descarte o produto.



# INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

## Pinça Bipolar de Uso Único

### **PINÇA BIPOLAR DE USO ÚNICO (ANTIADERENTE):**

As pontas polidas são feitas de aço inoxidável (prateadas) e podem manchar, o que não afeta a função dos instrumentos de uso único.

### **TESTE FUNCIONAL:**

Instrumentos de uso único devem ser verificados quanto à funcionalidade antes de cada uso. Inspeção visualmente os instrumentos quanto à limpeza e realize um teste de funcionamento.

Danos à superfície, como arranhões, rachaduras, entalhes, etc., ou peças dobradas, significam que os instrumentos não podem ser usados.

### **ATENÇÃO:**

Mau funcionamento, falha do instrumento, isolamento danificado.

### **AÇÃO REQUERIDA PELO USUÁRIO:**

Realizar uma inspeção visual / teste funcional. É de responsabilidade do usuário garantir que os instrumentos sejam usados de acordo com a finalidade pretendida.

### **ATENÇÃO:**

Capacidade de carga elétrica dos eletrodos excedidos.

### **AÇÃO REQUERIDA PELO USUÁRIO:**

Siga as instruções do fabricante para carregamento elétrico; consulte "Uso pretendido".

### **MANIPULAÇÃO:**

Instrumentos cirúrgicos devem sempre ser tratados com o máximo cuidado. Isto é, particularmente observando pontas e outras áreas sensíveis.



# INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

## Pinça Bipolar de Uso Único

### CONEXÕES DO GERADOR:

Pinças de uso único feitas pela adeor medical AG são aprovadas para uso com os seguintes geradores:

#### ERBE Elektromedizin GmbH

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
VIO 300 D	10140-100	≤ 200 Watt
VIO 200 D	10140-200	≤ 120 Watt
VIO 300 S	10140-300	≤ 200 Watt
VIO 200 S	10140-400	≤ 120 Watt
VIO 100 C	10140-500	≤ 80 Watt
VIO 50 C	10140-550	≤ 50 Watt
ICC 350	ICC 350	≤ 150 Watt
ICC 300	ICC 300	≤ 150 Watt
ICC 200	ICC 200	≤ 150 Watt
ICC 80	ICC 80	≤ 50 Watt
ICC 50	ICC 50	≤ 50 Watt
ACC 451	ICC 451	≤ 120 Watt
ACC 450	ICC 450	≤ 120 Watt
ACC 430	ICC 43	≤ 120 Watt

#### SUTTER Medizintechnik GmbH

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
BM-780 II	360080-01	≤ 70 Watt

#### KARL STORZ GmbH & Co. KG

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
AUTOCON® II 200	205322 20	≤ 120 Watt
AUTOCON® II 400	205352 20	≤ 120 Watt

#### COVIDIEN

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
Force FX™	Force FX™	≤ 70 Watt
ForceTriad™	ForceTriad™	≤ 95 Watt
Force EZ™	Force EZ™	≤ 70 Watt
SurgiStat™	SurgiStat™	≤ 30 Watt

## Pinça Bipolar de Uso Único

### BOWA-electronic GmbH & Co. KG

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
ARC 400	900-400	≤ 350 Watt
ARC 350	900-351	≤ 350 Watt
ARC 303	900-303	≤ 120 Watt
ARC 250	900-250	≤ 120 Watt
ARC 100	900-100	≤ 100 Watt

### Olympus Surgical Technologies Europe

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
ESG-100, 220-240 V	WB991036	≤ 120 Watt
ESG-100, 100-120 V	WB991046	≤ 120 Watt
ESG-400	WB91051W	≤ 320 Watt

### Söring GmbH

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
MBC 600	MBC 600	≤ 100 Watt
MBC 601	MBC 601	≤ 100 Watt
MBC 601	MBC 601	≤ 100 Watt
UAM	UAM	
MBC 200	MBC 200	≤ 140 Watt
BCC 140	BCC 140	≤ 140 Watt

### LAMIDEY NOURY MEDICAL

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
Optima 4	Optima 4	≤ 370 Watt
Optima 3	Optima 3	≤ 370 Watt
Optima 2	Optima 2	≤ 200 Watt
MC 2	MC 2	≤ 70 Watt
MC 3	MC 3	≤ 100 Watt
MC 4	MC 4	≤ 100 Watt

### Integra LifeSciences Corporation

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
Elektrotom® 621	Elektrotom® 621	≤ 95 Watt
Elektrotom® 630	Elektrotom® 630	≤ 95 Watt

## Pinça Bipolar de Uso Único

### Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
Minicutter	80-008-03-04	≤ 70 Watt
ME 102	80-010-02-04	≤ 80 Watt
maxium®, m-Version	80-042-00-04	≤ 320 Watt
maxium®, i-Version	80-042-02-04	≤ 320 Watt
maxium®, e-Version	80-042-04-04	≤ 320 Watt
ME MB 3, m-Version, 220-240 V	80-040-11-04	≤ 100 Watt
ME MB 3, m-Version, 100-127 V	80-040-11-10	≤ 100 Watt
ME MB 3, i-Version, 100-127 V	80-040-12-04	≤ 100 Watt
ME MB 3, i-Version, 100-127 V	80-040-12-10	≤ 100 Watt
ME 411	80-041-01	≤ 80 Watt

### Aesculap AG / B. Braun Melsungen AG

TIPO	ITEM NÚMERO	PODER MAX. COAG BIPOLAR
GN300	GN 300	≤ 80 Watt
GN640	GN640	≤ 100 Watt
GN060	GN060	≤ 50 Watt

### CABOS DE CONEXÃO ADEQUADOS:

Uma pinça bipolar de uso único foi aprovada para uso com o cabo bipolar.

Este cabo pode ser conectado apenas à saída bipolar de dispositivos eletrocirúrgicos. Por favor, siga as instruções do gerador para conectar esses cabos antes de usar a pinça bipolar de uso único.

Os geradores de alta frequência apresentam vários riscos, como operação incorreta, queimaduras de alta frequência não intencionais, ignição de líquidos e gases inflamáveis (risco de explosão).



# INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

## Pinça Bipolar de Uso Único

### EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO:

Algumas partes desses instrumentos descartáveis podem ser facilmente danificadas. Os instrumentos descartáveis esterilizados devem ser armazenados em um ambiente seco, limpo e livre de poeira em temperaturas moderadas de 5 ° C a 40 ° C.

### GARANTIA:

A adeor medical AG fornece aos clientes produtos testados e sem falhas. Todos os nossos produtos são projetados e fabricados para atender aos mais altos padrões de qualidade. No entanto, caso ocorram problemas, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. A responsabilidade é excluída para produtos que foram modificados a partir do produto original, usados para outros fins que não os pretendidos, manipulados ou utilizados indevidamente. A adeor medical AG não aceita responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais. Esta garantia é anulada se os reembolsos forem realizados por empresas que não estejam autorizadas para reparo pela adeor medical AG.

### DESCARTE ADEQUADO DA PINÇA BIPOLAR:

Se a pinça bipolar descartável não puder mais ser usada.  
Se estiver danificada, ela deve ser descartada adequadamente.

A instrução de uso acima refere-se aos componentes:

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>BIP047USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP048USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP048-1.5USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP050USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP051USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP052USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP052-1.5USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP053USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP054USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata



## Pinça Bipolar de Uso Único

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>BIP056USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP056-1.5USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP057USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP058USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP059USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP060USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP062USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP064USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP064-1.5USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP065USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP002US-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP003US-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP004US-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP005US-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP-S091US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S092US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S093US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S094US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S096US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S097US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S098US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S099US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S111US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S112US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S113US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S114US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S123US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S124US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP024EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP025EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP026EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP027EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP028EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP029EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP030EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP031EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP032EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata

## Pinça Bipolar de Uso Único

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>BIP033EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP034EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP035EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP036EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP037EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP038EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP039EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP040EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP041EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP042EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP043EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP044EUSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP045EUSU</b>	pinça bipolar angulada antiaderente prata
<b>BIP046EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP047EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP048EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP049EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP050EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP051EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP052EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP053EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP054EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP055EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP056EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP057EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP058EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP059EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP060EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP061EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP062EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP063EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP064EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP065EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP066EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP067EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP068EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP069EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata

## Pinça Bipolar de Uso Único

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>BIP070EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP071EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP072EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP073EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP074EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP075EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP076EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP077EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP078EUSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP024USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP025USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP026USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP027USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP028USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP029USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP030USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP031USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP032USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP033USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP034USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP035USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP036USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP037USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP038USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP039USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP040USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP041USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP042USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP043USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP044USSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente prata
<b>BIP045USSU</b>	pinça bipolar angulada antiaderente prata
<b>BIP046USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP048-2.0USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP049USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP052-2.0USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP055USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP061USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata

## Pinça Bipolar de Uso Único

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>BIP063USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP064USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP064-2.0USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP066USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP067USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP068USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP069USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP070USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP071USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP072USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP073USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP074USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP075USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP076USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP077USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP078USSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente prata
<b>BIP-S207US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP-S208US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP-S209US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP-S210US-SU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP001EU-IRSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente com irrigação
<b>BIP002EU-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP003EU-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP004EU-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP005EU-IRSU</b>	pinça bipolar baioneta antiaderente com irrigação prata
<b>BIP001US-IRSU</b>	pinça bipolar reta antiaderente com irrigação