


Micro Lâmina para Bisturi BHKY


Produtos modelo e especificação: Ver rótulo da embalagem

Diagrama de estrutura do produto

Lâmina de bisturi (estérel)

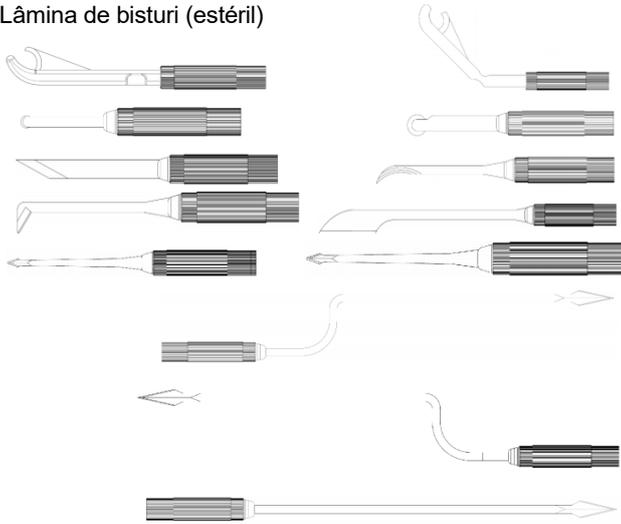


Cabo de bisturi (reutilizável)

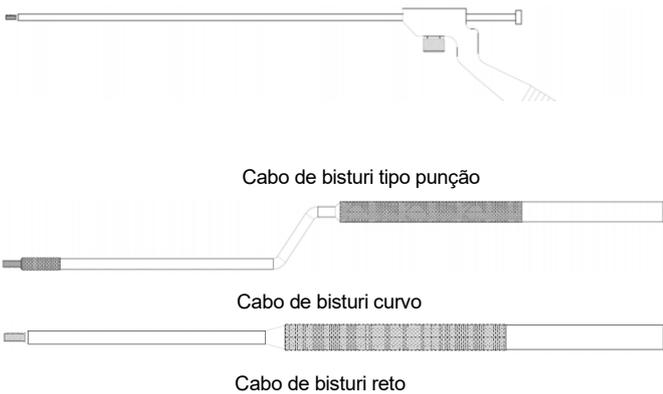


Modo de Uso

Parafuse o cabo do bisturi na base da lâmina apropriada.

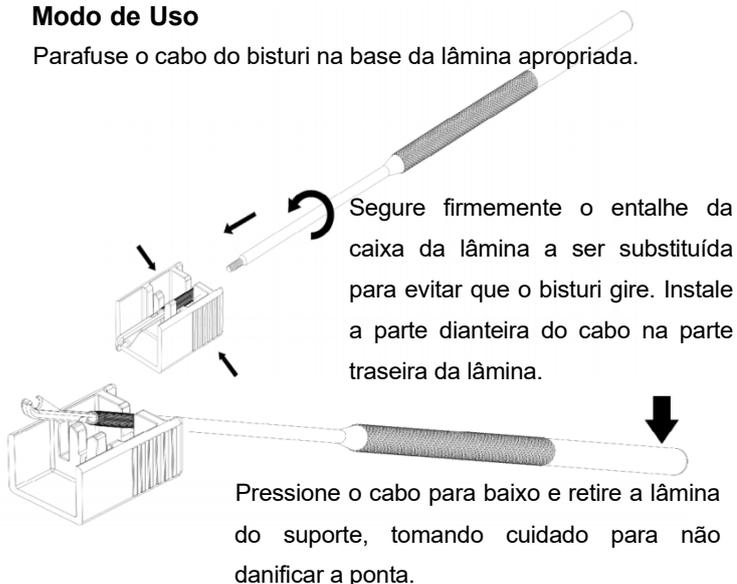


Após a remoção do suporte, apertar o parafuso até o final.

*É recomendável substituir a caixa de bisturi de substituição na ordem inversa ao descartar.

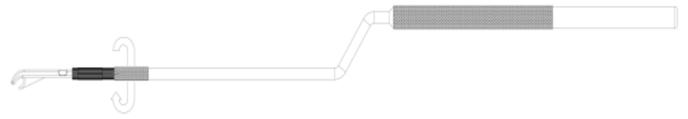

No caso de cabo de bisturi curvo, fixar o bisturi com os dedos em qualquer direção, e apertar o parafuso de ajuste do ângulo em um dos lados do retentor para fixá-lo completamente. Aperte na direção da seta no Diagrama.

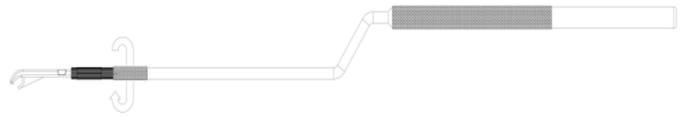

Indicação de uso

O Micro Lâmina de Bisturi BHKY é usado para secção fina e retirada de vasos sanguíneos e tecidos moles em cirurgia ou microcirurgia.

Desempenho do produto

- (1) A superfície do bisturi deve ser lisa, sem ferrugem, bordas afiadas, rebarbas, sem corrosão e manchas.
- (2) Ao cortar sutura de seda 3-0 sem revestimento (diâmetro de sutura 0,21 mm-0,22 mm), a força de corte não deve ser maior que 0,8N.
- (3) Depois que o cabo de bisturi é conectado à lâmina do bisturi, uma carga sem impacto de 10N é aplicada no meio do cabo, e a lâmina cai sem folga óbvia.
- (4) A dureza de bisturi não deve ser inferior a 600 HV_{0.3}.
- (5) A lâmina do bisturi é esterilizada por Óxido de Etileno, o SAL=10⁻⁶.

Precauções

- (1) Ao utilizar este produto, pode haver reação alérgica ou reação alérgica ao metal.
- (2) Usar imediatamente após a abertura do selo, e manusear de forma segura para evitar infecções após o uso.
- (3) Como o bisturi deste produto é afiado, deve-se ser muito cuidadoso ao usá-lo.
- (4) Não utilizar produtos deformados ou danificados.
- (5) Não decompor ou deformar ao utilizar este produto.
- (6) Após o uso, o produto deve ser descartado na embalagem, claramente identificada com seu conteúdo.
- (7) O bisturi retirado da caixa de embalagem não deve tocar qualquer lugar. Assim que o bisturi tocar em um determinado lugar, a afiação da ferramenta será danificada e reduzida.
- (8) O bisturi deve ser colocado na caixa para transferência.

Advertências

- (1) Os usuários devem ser familiarizados com as tecnologias e técnicas cirúrgicas.

- (2) Selecione o modelo apropriado de acordo com o propósito de uso, e seguir o procedimento habitual ao usar.
- (3) Favor não utilizar se a embalagem estiver danificada, manchada ou em outras condições anormais.
- (4) O fabricante recomenda uso único

Telefone: 0049 2131 4051968-0

Fax: 0049 2131 4051968-9

Pessoa de contato: Sr. Nianzhuang Liu

Código Dimdi: DE/0000045300

E-mail: dusai@eulinx.eu

Contraindicações

- (1) Este produto contém aço inoxidável e resina ABS. Não usar em pacientes com reações alérgicas para estas substâncias.
- (2) Não utilizá-lo para operações além do escopo de aplicação.
- (3) Quando o bisturi deste produto tocar em objetos fora do escopo de aplicação, não o utilize novamente [o bisturi será danificado e a afiação será significativamente reduzida].
- (4) Não esterilizar novamente o produto, o que pode causar danos e risco de infecção aos pacientes.


Armazenamento

- (1) Armazenar em ambiente seco e bem ventilado, à temperatura ambiente, sem gases corrosivos. Evitar a luz solar direta, alta temperatura e umidade.
- (2) Confirmar o prazo de validade indicado no produto, e descartar aqueles além do prazo de validade. Após a abertura, os não utilizados também devem ser descartados.
- (3) Veja o rótulo da embalagem para o prazo de validade do produto.

Embalagem

Menor embalagem de venda: 1 peça.

Prazo de validade: 2 anos.

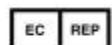	Marca CE		Número do lote
	Esterilizado por EO		Data de fabricação
	Representante da União Europeia		Fabricante
	Verificar as instruções de uso		Data de vencimento
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.		

Detentor do Registro:
CANADA CENTRAL DE NEGOCIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.911.022/0001-76
Av. Senador Tarso Dutra, 605, conjunto 1704, Petrópolis
Porto Alegre / RS
CEP: 90220211
Fone: +55 (51) 3346.5065
Site: <http://www.canadatrade.com.br/>

Notificação ANVISA nº: 80003899005

01/04/2019 Versão 1.0

Contate-nos para mais informações



Beijing Bohaikangyuan Medical Devices Co., Ltd.

1st and 2nd F, Bld 86, No. 16 Huanke Middle Rd., Tongzhou
District, 101102, Pequim

Tel: 86-10-87973098



Prolinx GmbH,

Brehmstr. 56, 40239, Düsseldorf, Alemanha