

CLIQUE HEMOSTÁTICO EVOCLIP



INDICAÇÕES

Os Clipes Hemostáticos evoClip indicados para obtenção de hemostasia após uma incisão no escalpo (couro cabeludo) em intervenções neurocirúrgicas que exigem a abertura do crânio.

MODO DE USO

Os Clipes Hemostáticos evoClip e suas embalagens devem ser verificados antes do uso para garantir que estejam intactos e que a data de validade seja respeitada. Os produtos cuja embalagem ou o próprio produto estejam danificados ou cuja data de validade já tenha expirado não devem ser usados em nenhuma circunstância.

Os clipes são aplicados no limite da ferida provocada no couro cabeludo em intervenções neurocirúrgicas para obtenção de hemostasia através da compressão mecânica. O tempo de permanência dos clipes no paciente depende da duração da cirurgia.

Os Clipes Hemostáticos evoClip devem ser utilizados apenas com as pinças do fabricante evonos.

AVISOS

Fabricante recomenda uso único.

Produto fornecido estéril. Os produtos evoClip e suas embalagens devem ser verificados antes do uso para garantir que estejam intactos e que a data de validade seja respeitada. Os produtos cuja embalagem ou o próprio produto estejam danificados ou cuja data de validade já tenha expirado não devem ser usados em nenhuma circunstância.

Apenas o aplicador do fabricante evonos deve ser utilizado com os clipes.

PRECAUÇÕES

Produtos defeituosos ou que tenham ultrapassado a data de validade devem ser imediatamente descartados.

Os Clipes Hemostáticos evoClip devem ser usados somente com a pinça da evonos; o uso com qualquer outra pinça, pode causar danos ao produto e risco de lesão ao paciente ou a terceiros.

Produtos da embalagem estéril que já tenham sido abertos ou danificados não podem ser usados.



INSTRUÇÕES DE USO

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente protegido poeira e luz direta do Sol e em temperatura ambiente. Grandes variações de temperatura devem ser evitadas durante o armazenamento.

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

PRODUTO ESTÉRIL

ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA

VALIDADE: 5 ANOS

Fabricante Legal:

evonos GmbH & Co. KG

Stockacher Str. 134 - Tuttlingen,
Alemanha

Detentor do registro:

Canada Central de Negócios do Brasil Ltda.

Av. Francisco Silveira Bitencourt, nº 1369, pavilhão 27 – sala 01,
2º andar

Sarandi - Porto Alegre / RS - CEP: 91.150-010

CNPJ: 01.911.022/0001-76

Resp. Técnico: Carla Sturm Trindade - CRF/RS 4709

Notificação ANVISA 80003890153